



## **Anleitung zur korrekten Handhabung und Versand von Fruchtwasser, fetalem Pleuraerguss und fetalem Urin**

<b>Patientenvorbereitung:</b>	Keine spezielle Vorgabe.
<b>Patienteninformation:</b>	Führen Sie eine genetische Beratung gemäss Gendiagnostikgesetz durch und füllen Sie anschliessend mit der Patientin das Anmeldeformular aus, inklusive erforderlichen Unterschriften.
<b>Probengefäss:</b>	Sterile Rundbodenröhrchen. Diese können auch bei uns am Institut für Medizinische Genetik bestellt werden*.
<b>Probenmaterial:</b>	Fruchtwasser oder fetaler Pleuraerguss oder fetaler Urin.
<b>Benötigtes Probenvolumen:</b>	12-20 ml
<b>Entnahmeprozedere:</b>	Punktion gemäss Ihren Richtlinien durchführen und Material steril in ein mit Etikette beschriftetes (Vorname, Name, Geburtsdatum der Patientin) Rundbodenröhrchen einfüllen.
<b>Rückversand:</b>	Versand bei Raumtemperatur. Das Untersuchungsmaterial sollte am Tag der Probenentnahme im Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich, Wagistrasse 12, 8952 Schlieren von Montag bis Freitag und zwischen 9:00 und 16:30 Uhr eintreffen. Bei Abnahme am Abend kann die Probe über Nacht im Kühlschrank bei +4°C gelagert und sollte am nächsten Tag sofort versandt werden. <u>Ausnahmen bitte telefonisch anmelden und besprechen.</u>
<b>Untersuchungsdauer:</b>	In der Regel liegt innerhalb von ca. 15-21 Tagen ein Resultat vor; Aneuploidie screening („Schnelltest“) ca. 1-2 Tage; gezielte molekulare Untersuchungen: circa 2-7 Tage. Umfangreicheres Mutationscreening 2-8 Wochen.
<b>Kontakt:</b>	Ansprechpartner bezüglich labortechnischer Fragen: Chromosomen-Diagnostisches Labor: Dr. Beatrice Oneda, <a href="mailto:onedab@medgen.uzh.ch">onedab@medgen.uzh.ch</a> , Tel. 044 556 3333 Molekular-Diagnostisches Labor: Prof. Dr. Alessandra Baumer, <a href="mailto:baumer@medgen.uzh.ch">baumer@medgen.uzh.ch</a> , Tel. 044 556 3321 Bezüglich medizinischer Handlungsempfehlungen: Prof. Dr. med. Anita Rauch, Tel. 044 556 3300, <a href="mailto:medgen@hin.ch">medgen@hin.ch</a>

*\*Inhalt des Fruchtwasser-Entnahmesets:*

- 1 Steriles Rundbodenröhrchen + Verpackungsmaterial + Etiketten
- 1 Anmeldeformular - steht auch auf unserer Homepage ([www.medgen.uzh.ch](http://www.medgen.uzh.ch)) zur Verfügung
- 1 Anleitung zur korrekten Versandmaterialhandhabung