



Anleitung zur korrekten Handhabung und Versand von Mundschleimhautabstrichen

Patientenvorbereitung:	Patient/In soll nichts getrunken, gegessen oder geraucht haben mindestens 30 Minuten vor Probenentnahme. Bitte beachten: auch keine Kaugummis oder Bonbons.
Patienteninformation:	Führen Sie eine genetische Beratung gemäss Gendiagnostikgesetz durch und füllen Sie anschliessend mit der Patientin das Anmeldeformular aus, inklusive erforderlichen Unterschriften.
Probengefäss:	Objektträger für Mikroskopie. Diese können auch bei uns am Institut für Medizinische Genetik bestellt werden*.
Probenmaterial:	Epithelzellen von Mundschleimhautabstrichen, 2 Präparate: je 1 Präparat einer Wange.
Benötigtes Probenvolumen:	2 Präparate
Entnahmeprozedere:	Auf je einer Wangeninnenseite mit je einem Holzspatel 2-4 mal über die Mundschleimhaut streichen. Mit dem Spatel das Abstrichmaterial auf die mit Vorname, Name, Geburtsdatum der Patientin, Wange links / Wange rechts identifizierten (mit Bleistift) Objektträger auftragen.
Der Rückversand:	Versand bei Raumtemperatur an das Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich, Wagistrasse 12, 8952 Schlieren. Die Probe sollte spätestens am Folgetag im Institut eintreffen. Falls notwendig, kann die Probe über Nacht oder über das Wochenende im Kühlschrank bei +4°C gelagert werden. Längere Lagerzeiten führen zu Qualitätseinbussen und zur Nichtmehr-Verwendbarkeit. <u>Ausnahmen bitte telefonisch anmelden und besprechen.</u>
Untersuchungsdauer:	In der Regel liegt innerhalb von ca. 7-15 Tagen ein Resultat vor; Aneuploidie screening („Schnelltest“) ca. 1-2 Tage.
Kontakt:	Ansprechpartner bezüglich labortechnischer Fragen: Chromosomen-Diagnostisches Labor: Dr. Beatrice Oneda, oned@medgen.uzh.ch , Tel. 044 556 3333 Bezüglich medizinischer Handlungsempfehlungen: Dr. med. Katharina Steindl, steindl@medgen.uzh.ch , 044 556 3310

**Inhalt des Mundschleimhautabstrich-Entnahmesets:*

- 2 Objektträger für Mikroskopie + Versanddosen + Etiketten
- 1 Anmeldeformular - steht auch auf unserer Homepage (www.medgen.uzh.ch) zur Verfügung
- 1 Anleitung zur korrekten Versandmaterialhandhabung