



**Leitung:**

Prof. Dr. med. Anita Rauch  
Direktorin  
PD Dr. phil. biochem. Beatrice Oneda  
Abteilungsleiterin

# Nicht-invasiver Pränatal Test (NIPT)

## Anleitung zur korrekten Blutentnahme und zum Versand

**Kontrollieren Sie die Vollständigkeit der Abnahmesets und das Haltbarkeitsdatum des Blutröhrchens:**

**Inhalt des NIPT-Abnahmesets:**

- 1 BCT-Blutentnahme-Röhrchen (Streck®)
- 1 BD®-Venenpunktions-Set (Butterfly)
- 1 Klebeetikette zur Beschriftung des Röhrchens
- 1 Schutzgefäss mit Saugeinlage
- 1 Gel-Umverpackung (Temperaturstabilisierung)
- 1 Anmeldeformular / Einwilligungserklärung
- 1 Anleitung zur korrekten Blutentnahme und zum Versand

**Patienten-  
Vorbereitung:**

Keine spezielle Vorgabe

**Patienten  
Aufklärung:**

Führen Sie eine genetische Beratung gemäss Gendiagnostikgesetz durch und füllen Sie anschliessend mit der Patientin das beiliegende Auftragsformular / Einwilligungserklärung aus.

**Proben-  
material:**

Venöses Blut

1 Streck® Cell-Free DNA™ BCT

**Blut-  
röhrchen:**

Weitere Informationen sind auf der Hersteller-Webseite [www.streck.com](http://www.streck.com) verfügbar.

Weitere Röhrchen und Versandmaterial können via [bestellformular@medgen.uzh.ch](mailto:bestellformular@medgen.uzh.ch) bestellt werden

**Benötigtes**

1 x 10 ml BCT-Blut

**Probenvolumen:**

vollständig gefüllt, mehrfach invertiert

**Entnahme-  
prozedere:**

**Standard-Blutabnahme mit Blutabnahmesystem**

**Vorgehen bei der Blutabnahme:**

1. Füllen Sie die beiliegenden Etiketten für die Identifikation der Probe aus (Vor-name, Name, Geburtsdatum) und kleben Sie diese in den unteren Bereich des Röhrchens.
2. Führen Sie die Blutentnahme mit dem beiliegenden Vacutainer®-System durch:
  - Röhrchen Halter auf das Vacutainer®-System aufschrauben.
  - Venenpunktion gemäss Ihren Richtlinien durchführen.
  - Aufstecken des speziellen Streck® BCT-Röhrchens, welches unter Vakuum steht.
  - Halten Sie das Blutröhrchen bei der Entnahme in aufrechter Position.
  - Beim Befüllungsvorgang des BCT-Blutröhrchens sollte ein Rückfluss aus dem Cell-Free DNA TM-BCT Blutentnahmeröhrchen vermieden werden. Weitere Informationen sind auf der Herstellerwebseite [www.streck.com](http://www.streck.com) verfügbar.
  - Füllen Sie das Blutröhrchen mit 10 ml Blut. Bei weniger als 8 ml oder mehr als 10 ml behalten wir uns das Recht vor, die Probe abzulehnen.
  - Vermeiden Sie den Kontakt des Additivs mit der Kanüle bzw. dem Gummi-stopfen.
3. Invertieren Sie das gefüllte Blutentnahmeröhrchen nach der Blutentnahme 10x.
4. Stecken Sie das Röhrchen in das Schutzgefäss mit Saugeinlage.
5. Legen Sie das Röhrchen in die Rücksendebox.

Bitte lagern Sie die Abnahmeboxen bei Raumtemperatur (18-30°C).

**Lager-  
bedingungen:**

Nach der Blutentnahme lagern Sie die versandbereite Blutprobe innerhalb der Rücksendebox im Kühlschrank bei 6-10°C (in oberer Kühlschrankposition und nicht in unmittelbarer Nähe von Kühlelementen bzw. <4°C lagern!).

**Das Blut sollte innerhalb von 48 Stunden eintreffen, spätestens bis 17:00 Uhr, von Montag bis Freitag, an folgender Adresse:**

**Der  
Rückversand:**

Institut für Medizinische Genetik – UZH  
Probeneingang  
Wagistrasse 12  
8952 Schlieren

**Kontakt:**

[zuweisung@medgen.uzh.ch](mailto:zuweisung@medgen.uzh.ch) (HIN secured)  
T: +41 44 556 33 00

**Ansprechpartner Labortechnischer Fragen:**

PD Dr. phil. biochem. Beatrice Oneda

**Ansprechpartner medizinischer Handlungsempfehlungen:**

Prof. Dr. med. Anita Rauch  
Dr. med. Katharina Steindl