



Direktorin:

Prof. Dr. med. Anita Rauch
FMH & FAMH Medizinische Genetik

Abteilungsleiterin:

PD Dr. phil. biochem. Beatrice Oneda
FAMH Medizinische Genetik

NIPT Nicht-invasiver Pränataltest

Anleitung zur korrekten Blutentnahme und zum Versand

Kontrollieren Sie die Vollständigkeit der Abnahmesets und das Haltbarkeitsdatum des Blutröhrchens:

Inhalt des NIPT-Abnahmesets:

- 1 BCT-Blutentnahme-Röhrchen (Streck®)
- 1 BD®-Venenpunktions-Set (Butterfly)
- 1 Klebeetikette zur Beschriftung des Röhrchens
- 1 Schutzgefäss mit Saugeinlage
- 1 Gel-Umverpackung (Temperaturstabilisierung)
- 1 Anmeldeformular / Einwilligungserklärung
- 1 Anleitung zur korrekten Blutentnahme und zum Versand

Patientenvorbereitung:	Keine spezielle Vorgabe.
Patienten-Aufklärung:	Führen Sie gemäss dem Gendiagnostikgesetz eine genetische Beratung durch und füllen Sie anschliessend mit der Patientin das beiliegende Anmeldeformular / Einwilligungserklärung aus.
Probenmaterial:	Venöses Blut.
Blutröhrchen:	1 Streck® Cell-Free DNA™ BCT (weitere Informationen sind auf der Herstellerhomepage verfügbar: www.streck.com). Weitere Röhrchen und Versandmaterial können via bestellformular@medgen.uzh.ch bestellt werden.
Benötigtes Probenvolumen:	1 x 10 ml BCT-Blut (vollständig gefüllt, mehrfach invertiert).



Entnahmeprozedere:

Standard-Blutabnahme mit **Blutabnahmesystem**.

Vorgehen bei der Blutabnahme:

1. Füllen Sie die beiliegenden Etiketten für die Identifikation der Probe aus (Vorname, Name, Geburtsdatum) und kleben Sie diese in den unteren Bereich des Röhrchens.
2. Führen Sie die Blutentnahme mit dem beiliegenden Vacutainer®-System durch
 - Röhrchenhalter auf das Vacutainer®-System aufschrauben.
 - Venenpunktion gemäss Ihren Richtlinien durchführen.
 - Aufstecken des speziellen Streck® BCT-Röhrchens, welches unter Vakuum steht.
 - Halten Sie das Blutröhrchen bei der Entnahme in aufrechter Position.
 - Beim Befüllungsvorgang des BCT-Blutröhrchens sollte ein Rückfluss aus dem Cell-Free DNA TM-BCT Blutentnahmeröhrchen vermieden werden. Weitere Informationen sind auf der Herstellerhomepage verfügbar (www.streck.com).
 - Füllen Sie das Blutröhrchen mit 10 ml Blut. Bei weniger als 8 ml oder mehr als 10 ml behalten wir uns das Recht vor, die Probe abzulehnen.
 - Vermeiden Sie den Kontakt des Additivs mit der Kanüle bzw. dem Gummistopfen.
3. Invertieren Sie das gefüllte Blutentnahmeröhrchen nach der Blutentnahme 10x.
4. Stecken Sie das Röhrchen in das Schutzgefäss mit Saugeinlage.
5. Legen Sie das Röhrchen in die Rücksendebox.

Lagerbedingungen:

Bitte lagern Sie die Abnahmeboxen bei Raumtemperatur (18-30°C). Nach der Blutentnahme lagern Sie die versandbereite Blutprobe innerhalb der Rücksendebox im Kühlschrank bei 6-10°C (in oberer Kühlschrankposition und nicht in unmittelbarer Nähe von Kühlelementen bzw. <4°C lagern!!).

Der Rückversand:

Das Blut sollte innerhalb von 48 Stunden eintreffen, spätestens bis 17 Uhr, von Montag bis Freitag, an folgender Adresse:

**Institut für Medizinische Genetik – UZH
Probeneingang
Wagistrasse 12
8952 Schlieren**

Kontakt:

zuweisung@medgen.uzh.ch
Tel. +41 44 556 33 00

Ansprechpartner bezüglich labortechnischer Fragen:

PD Dr. Beatrice Oneda

Bezüglich medizinischer Handlungsempfehlungen:

Prof. Dr. med. Anita Rauch
Dr. med. Katharina Steindl